



insert the battery &  
operate the FAO  
oximeter  
入電池及操作 FAO  
血氧儀

## 血氧儀使用有問題？ 看這裡！

- Q**
- 使用中突然關機？
  - 讀數不穩定？
  - 測量不出數據？



- A**
- 輕按**1**下即可開機。  
請將指甲面朝上，完全插入血氧儀。  
測量時請保持靜止(大概4-5秒)  
請在溫暖的室內進行測量。

---

1.如果您的手指溫度太低，建議用熱水將手泡溫暖之後再試。

---

2.請**務必**去掉手指上的美甲或指甲油。

---

3.小孩子的手指比較小，可能測量不準確。  
請使用小朋友專用血氧儀。



insert the battery &  
operate the FAN  
oximeter  
入電池及操作 FAN  
血氧儀

## 血氧儀使用有問題？ 看這裡！

- Q**
- 使用中突然關機？
  - 讀數不穩定？
  - 測量不出數據？



- A**
- 輕按**1**下即可開機。  
請將指甲面朝上，完全插入血氧儀。  
測量時請保持靜止(大概4-5秒)  
請在溫暖的室內進行測量。

---

1.如果您的手指溫度太低，建議用熱水將手泡溫暖之後再試。

---

2.請**務必**去掉手指上的美甲或指甲油。

---

3.小孩子的手指比較小，可能測量不準確。  
請使用小朋友專用血氧儀。